



SAVE *SAFE*

Экономьте деньги и время без риска
для пациентов



SAVE

экономьте деньги и время без риска для пациентов

SAVE ДЕНЬГИ



Используя самую дорогую часть инфузионной системы в течение 24 часов для нескольких пациентов, вы можете сократить затраты до 60% каждый день

SAVE ВРЕМЯ



Вам больше не нужно заменять и заправлять шприцы после каждого пациента. Это позволит вам сосредоточиться на других задачах и сократить период оборота пациентов.


SAVE ОТХОДЫ



Система Transflux® разработана для обеспечения безопасности пациента при одновременном сокращении расхода материалов. При повторном использовании большей части линий и шприцев вы экономите на контрасте, шприцах и линиях заполнения. Сокращение отходов может достигать 60% по сравнению с одноразовыми системами.

Оптимальная комбинация

Комбинация Transflux® и Transset® обеспечивает эффективное, безопасное и экономичное решение для доставки контрастных веществ. Вам больше не нужно менять шприцы «для каждого пациента». Магистраль Transflux® защищает основную магистраль Transset® от загрязнения при использовании с несколькими пациентами. Transset® можно использовать в течение 24 часов подряд при использовании в сочетании с Transflux® и в соответствии с указаниями в инструкции по применению.

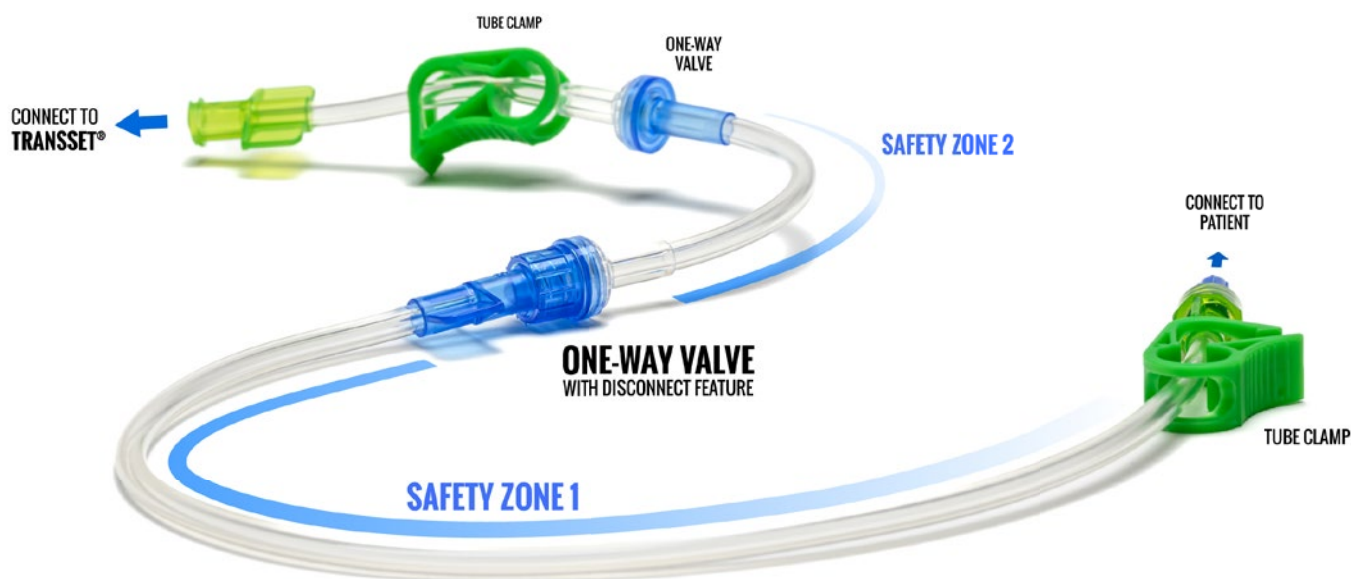

SAFE

уникальные параметры для безопасности пациентов

РАЗЪЕДИНЕНИЕ ЧАСТЕЙ ЛИНИИ



Наша инновационная и запатентованная функция разъединения дистальной и проксимальной части магистрали позволяет контролировать рефлюкс крови и предотвращает экстравазацию. Кроме того, эта функция обеспечивает непрерывный доступ к вене, гарантируя быстрое вмешательство в случае непредвиденной реакции, что позволяет немедленно вводить лекарства.

ДВА КЛАПАНА ДВЕ ЗОНЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Два односторонних клапана, разделенных зоной взаимодействия давления жидкости, предотвращают обратный ток крови, обеспечивая дополнительную защиту для магистрали Transset®. После окончания обследования вы можете легко отсоединить магистраль Transflux®, оставив часть с двойным клапаном на Transset®, обеспечивая герметичность и безопасность всей системы до применения со следующим пациентом.

Безопасная комбинация



Мы все стремимся быть максимально эффективными. Однако, при этом, важно обеспечить безопасность как ваших работников, так и пациентов. Transflux® и Transset® специально разработаны на основе этого принципа! Одноразовые изделия обычно используются с целью контроля инфекций, но они увеличивают стоимость и количество отходов в ваших процедурах. С комбинацией Transflux® и Transset® вы получаете лучшее из обоих миров: самая большая и самая дорогая часть используется для нескольких пациентов, в то время как самая маленькая и наименее дорогая часть системы доступна, что снижает как стоимость, так и количество отходов. Одноразовая часть Transflux® защищает многоразовую часть Transset® от рисков перекрестного заражения. Кроме того, Transflux® действует как защитный колпачок для Transset® от воздействия окружающей среды между пациентами, что еще больше снижает риск заражения. Несколько исследований демонстрируют, что Transflux® и Transset® безопасны в использовании, без случаев перекрестного загрязнения или загрязнения окружающей среды в течение 24-часового использования.

ИНСТРУКЦИЯ (ИНФОРМАЦИОННО*)



ПОДГОТОВЬТЕ TRANSSET (ОДИН РАЗ В 24 ЧАСА)



ПОДГОТОВЬТЕ TRANSFLUX (НА КАЖДОГО ПАЦИЕНТА)

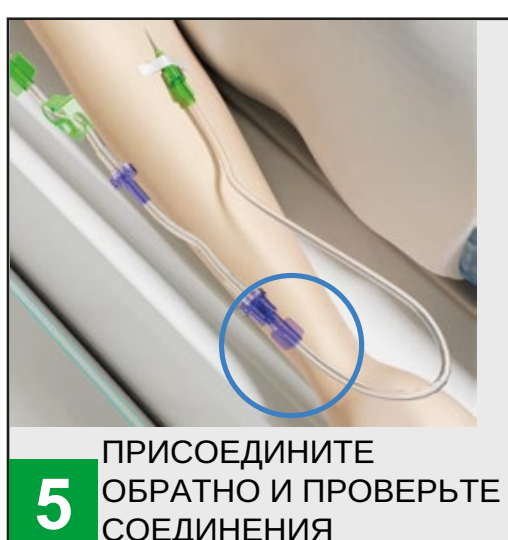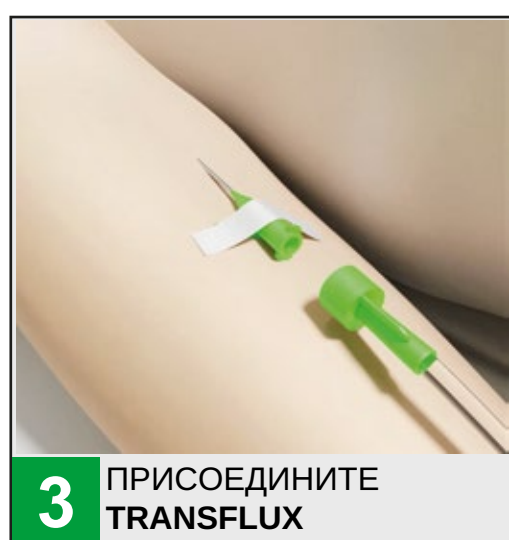

ПОСЛЕ КАЖДОЙ ИНЪЕКЦИИ

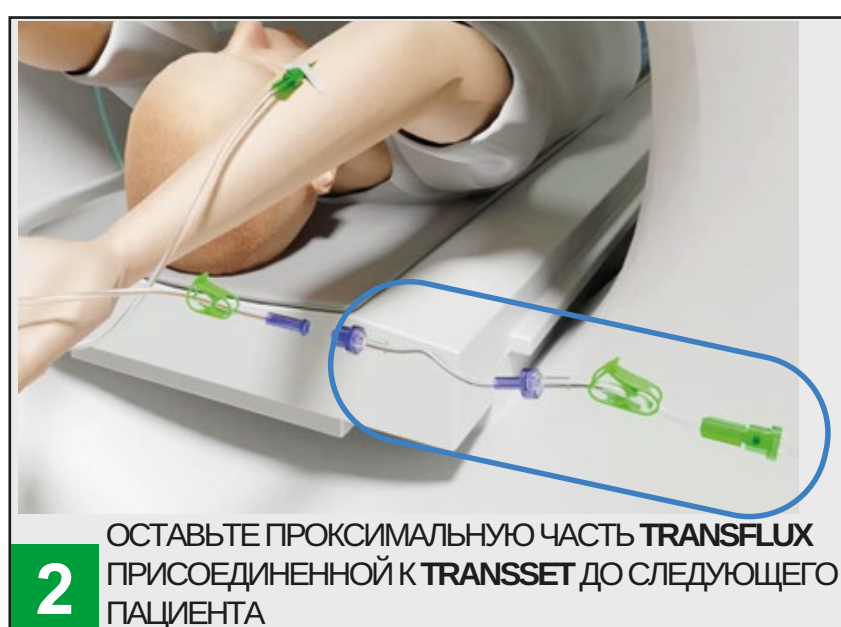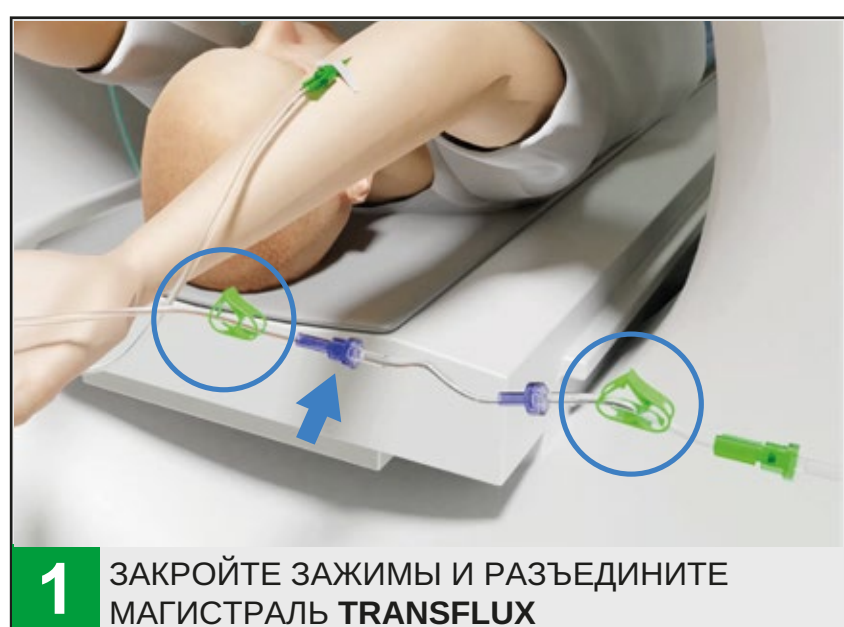

Transflux® & Transset®

безопасная комбинация



ООО "ДСТ"

108811, город Москва, поселение Московский,

город Московский, ул. Бианки, д. 1, кв. 24

E-mail: dst.offices@gmail.com

Mobile: +7 (916) 815-85-01